

CLENSATRON® BASIC

KONTAKTLENCSZE TISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ


A CLENSATRON® BASIC egy kontaktlencse tisztító készülék, amellyel a kontaktlencse biztonságosan és hatékonyan tisztítható (kiváltja a kézzel rázós módszert). A CLENSATRON hatékonyan működik a kontaktlencse tisztító folyadékokkal. A CLENSATRON használható tartályként fertőtlenítésre és enzimes tisztításra.

A CLENSATRON® BASIC tartozéka egy IKER LENCSE KOSÁR - mely "L" (bal) és "R" (jobb) jelzéssel ellátott -, és két FOLYADÉK TARTÁLY. A CLENSATRON® BASIC 2 db AA normál alkáli ceruzaelemmel működik (nem tartozék).


HASZNÁLAT

1. Tartsa függőlegesen a készüléket, és vegye le róla gyengéden a műanyag folyadék tartályt (1. ábra „c”).
2. Húzza ki gyengéden a lencsetartó kosarat (1. ábra „b”). Nyissa fel a kosarakat, és helyezze be középre a lencsét a jelzésnek megfelelően (R: jobb; L: bal). A kosarak a lencse alakjához formázottak. Győződjön meg arról, hogy a lencsék igazodnak-e a kosárhoz (2. ábra).
3. Zárja össze mindkét lencsetartó kosarat, ügyelve a lencsére és a pontos záródásra.
4. Hajtsa össze egymáshoz a kosarakat és nyomja vissza a lencsetartót a készülékre.
5. Töltse fel a folyadéktartályt a megfelelő folyadékkal a szintjelzésig. **NE TÖLTSE TÚL A TARTÁLYT!** (3. ábra).
6. Tartsa függőlegesen a készüléket (4. ábra), és illessze fel a folyadéktartályt a készülékre. A tartálynak szorosan kell illeszkednie. **Működés közben tartsa a készüléket szilárd sík felületen.**
7. Kapcsolja be a készüléket (1. ábra „d”). Működtesse a készüléket kb. 2 percig, majd kapcsolja ki.


Ismételje meg az 5-7 lépéseket az összes szükséges folyadékkal.

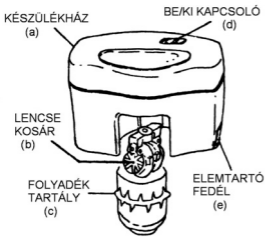

1. ábra

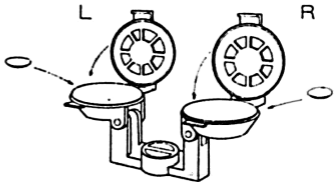

2. ábra

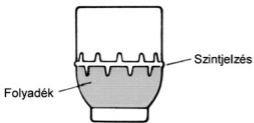


FONTOS!
A FOLYADÉK MINDIG A SZINTJELZÉS
ALATT LEGYEN

NE TÖLTSE TÚL!

3. ábra

TARTSA FÜGGŐLEGESEN A KÉSZÜLÉKET,
HA A TARTÁLY FOLYADÉKKAL TÖLTÖTT

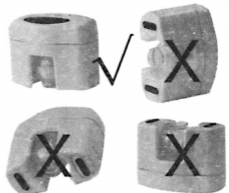

4. ábra

NÉHÁNY HASZNOS TANÁCS:

- MOSSON KEZET, MIELŐTT A LENCSEKHEZ ÉRNE.
- MINDEN ALKALOMMAL HASZNÁLJON FRISS FOLYADÉKOT.
- HASZNÁLAT UTÁN ÖBLÍTSE LE A KOSARAT ÉS A TARTÁLYT, MAJD HAGYJA MEGSZÁRADNI.
- NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET VÍZBE VAGY FOLYADÉKBA.
- NE FORDÍTSA ÁT A TETEJÉRE A KÉSZÜLÉKET, AMIKOR FOLYADÉKKAL TÖLTÖTT TARTÁLY RAJTA VAN.
- A CLENSATRON KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁLJA LENCSESZÁLLÍTÁSHOZ.
- MELLŐZZE A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁT MEGHIBÁSODÁS, REPEDÉS VAGY EGYÉB SÉRÜLÉS ESETÉN.

LEGGYAKRABBAN FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK

KÉRDÉS: MIT CSINÁL A CLENSATRON?

VÁLASZ: Alapvetően ez egy miniatűr mosógép a kontaktlencsék tisztításához, növelve a tisztító folyadék hatékonyságát, a tisztítást, fertőtlenítést és enzimes tisztítást.

KÉRDÉS: MILYEN TÍPUSÚ KONTAKTLENCSÉK TISZTÍTÁSÁRA HASZNÁLHATÓ A CLENSATRON?

VÁLASZ: A CLENSATRON minden kontaktlencse típus tisztítására alkalmas: Puha, merev, kemény stb.

KÉRDÉS: KÁROSÍTHATJA A CLENSATRON A LENCSEKET?

VÁLASZ: Amíg a készülék az előírások szerint használt, a lencsék nem károsodhatnak. Ügyeljen arra, hogy a lencsék a kosárban középre kerüljenek.

KÉRDÉS: JOBBAN TISZTÍTHATÓ ÍGY A KONTAKTLENCSÉ?

VÁLASZ: A CLENSATRON klinikailag bizonyítottan jóval hatékonyabb a kézzel dörzsölős és áztatós módszernél. Az első használatkor éreznie kell a különbséget.

KÉRDÉS: SZÜKSÉG VAN FOLYADÉKRA?

VÁLASZ: Igen, a tisztító folyadék továbbra is szükséges.

KÉRDÉS: MILYEN FOLYADÉKOT KELL HASZNÁLNI?

VÁLASZ: A tisztító folyadékkal kapcsolatban nézze meg a kontaktlencse gyártó ajánlásait. A CLENSATRON használható mindenféle kontaktlencse-tisztító folyadékkal.

KÉRDÉS: TOVÁBBRA IS SZÜKSÉGES AZ ENZIMES TISZTÍTÁS HETI EGYSZER?

VÁLASZ: Igen, de ez is elvégezhető a készülékkel.

KÉRDÉS: MIÉRT VAN 2 MOSÓ TARTÁLY ÉS LENCSETARTÓ KOSÁR?

VÁLASZ: Egy tartalék szettet ingyenesen biztosít a gyártó.

KÉRDÉS: HASZNÁLHATÓ-E A CLENSATRON HŐFERTŐTLENÍTÉS MELLETT?

VÁLASZ: Azok a személyek, akik hőfertőtlenítést alkalmaznak, a CLENSATRON készüléket is használhatják tisztításra, öblítésre és enzimes fertőtlenítésre. Hőfertőtlenítéskor a lencsét ki kell venni a kosárból.

JÓTÁLLÁS:

A termékre a vásárlás napjától számított 12 hónapig jótállást vállalunk a 151/2003. (IX. 22.) rendelet szerint. A garancia csak számlával együtt érvényes!

Import disztribútor és szerviz: DEALTECH HUNGARY Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel/Fax: 1-481-9507
e-mail: dealtech@interware.hu; honlap: www.dealtech.hu