

OK TOUCH BÉBI HŐMÉRSÉKLET FIGYELŐ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Testhőmérséklet figyelés és hőmérséklet mérés

(1) Testhőmérséklet figyelés:

1. ábra: Rögzítse a készüléket hőmérséklet figyelőként, pl. a mellkas alá vagy a pelenka belső feléhez. Az érzékelő végnek a bőrrel érintkeznie kell.

- Bekapcsolás: Nyomja meg a K gombot a bekapcsoláshoz.

- Törlés riasztáskor: Nyomja meg a K gombot egyszer.

- Kikapcsolás: Tartsa nyomva a K gombot 2 mp-ig, amíg a kijelzés el nem tűnik.

(2) Takaró alatti hőmérséklet figyelés:

2. ábra: Tegye az eszközt a csecsemő ruhája alá, az LCD kijelzővel felfelé, hogy a mérővég a bébi bőrével érintkezzen. Ezután takarja be a csecsemőt.

- Bekapcsolás: Nyomja meg a K gombot a bekapcsoláshoz.

- Törlés riasztáskor: Nyomja meg a K gombot egyszer.

- Kikapcsolás: Tartsa nyomva a K gombot 2 mp-ig, amíg a kijelzés el nem tűnik.

(3) Testhőmérséklet mérés:

3. ábra: Hajtsa ki a mérőfejet, és helyezze a nyelv alá.

- Bekapcsolás: Nyomja meg a K gombot a bekapcsoláshoz. A mérés befejeztével "Bi-Bi" sípolás hallható, a sziréna szimbólum villog és a kijelzőn marad a mért érték.

- Kikapcsolás: Tartsa nyomva a K gombot 2 mp-ig, amíg a kijelzés el nem tűnik.

(4) Szoba hőmérséklet mérés:

Helyezze az eszközt az asztalra néhány másodpercig.

- Bekapcsolás: Nyomja meg a K gombot a bekapcsoláshoz. A mérés befejeztével "Bi-Bi" sípolás hallható, a sziréna szimbólum villog és a kijelzőn marad a mért érték.

- Kikapcsolás: Tartsa nyomva a K gombot 2 mp-ig, amíg a kijelzés el nem tűnik.

1. ábra: Testhőmérséklet figyelés

Újszülött csecsemőnél rögzítse a hőmérőt a mellkas alá, a pelenkára.




2. ábra: Takaró alatti hőmérséklet figyelés




3. ábra: Testhőmérséklet mérés Szájban történő mérés



A bébimonitor előlnézete

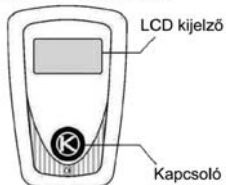

Használat előtt az előlap védőfóliája eltávolítandó.

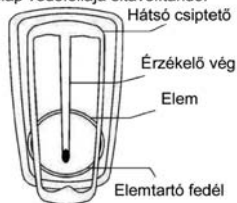

A funkciók részletes leírása:

A készülék bekapcsolását követően egy "Bi" sípolás hallható. Ez a készülék helyes működését jelzi, és az eszköz készen áll a mérésre. A kettős "Bi" sípolás jelzi, hogy a hőmérséklet mérés normálisan befejeződött. Ekkor a sziréna szimbólum villog, és a kijelzőn 10 másodpercig változatlan marad a mért hőmérséklet, a könnyű leolvasás érdekében. Amint a sziréna szimbólum villogása megszűnik, a készülék belép a monitorozó, vagyis figyelő módba. (Ekkor a készülék elkezd a célhőmérséklethez viszonyítani, ezért ne mozgassa a készüléket.)

Ha monitorozó módban a készülék riaszt, ez azt jelzi, hogy a hőmérséklet nem a normális tartományban van. Nyomja meg a K gombot egyszer a riasztás leállításához. A monitorozó mód tovább folytatódik. Ha a hőmérséklet bármikor kilép a normál tartományból, a készülék ismét riaszt.

A monitorozó és célhőmérséklet tartományok értelmezése:

Célhőmérséklet tartományok monitorozó módban	Hőmérséklet különbség riasztáshoz	Használat
15°C ~ 32°C	6°C-onkénti csökkenés	Takaró alatti monitorozás: Tegye az eszközt a csecsemő ruhája alá és takarja be a csecsemőt.
32°C ~ 37°C	1°C-onkénti emelkedés vagy csökkenés	Testhőmérséklet monitorozás: Amint láz fordul elő vagy a test hőmérséklete abnormálisan csökken, az eszköz riaszt
37°C ~ 43°C	0,5°C-onkénti emelkedés vagy csökkenés	Láz monitorozás: Figyeli a láz visszatértét a hőmérséklet visszaesését követően

Megjegyzések:

A készülék nem vízálló, ezért vízzel nem mosható. Alkoholos vattával áttörölhető. Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas környezeti hőmérsékletnek. A mérőfej és a csiptető leszedése nem megengedett. Fülhőmérséklet mérésére nem alkalmazható. Ne szerelje szét, és ne változtasson semmit a készüléken. Nem lenyelhető, gyermek kezébe nem adható.

Elemcsere

Ha a kijelzőn megjelenik az elem szimbólum, cserélje ki az elemet. A készülék hátulján található elemtartó fedél a csipetű leszedése nélkül felpattintható a fedélen található kis fülecske felfelé húzásával, ha a mérőfejet felhajtja.

Az elemet a pozitív (+) pólusával felfelé kell behelyezni.

Termék jellemzők:

Hőmérséklet mérési tartomány:	10°C ~ 43°C
Pontosság:	10°C ~ 32°C ± 0,3°C 32°C ~ 43°C ± 0,1°C
Méret:	5,6 x 3,2 x 2,1 cm
Súly:	20 gramm
Elem típus:	1,5V A76

Testhőmérséklet mérés időtartama:

Száj hőmérséklet: kb. 1 perc

Hónalj és has hőmérséklet: kb. 2-3 perc

(hosszabb idő alatt pontosabb érték adódik)

A has hőmérséklet 1-1,5 °C értékkel alacsonyabb, mint a száj hőmérséklete.

A készülék riasztás funkciójának tesztelése:

Helyezze a készüléket a hasra. Kapcsolja be a készüléket. A dupla (Bi-Bi) sípolást követően várjon 1 percet, majd helyezze a készüléket az asztalra. 30 másodpercen belül a készülék hangriasztást ad.

JÓTÁLLÁS

A termékre a vásárlás napjától számított 12 hónapig jótállást vállalunk a 151/2003. (IX.22.) rendelet szerint. A garancia csak számlával együtt érvényes!

Import disztribútor:

DEALTECH HUNGARY KFT.

1117 Budapest, Budafoki út 183.

Tel/Fax: 06-1-481-9507;

Mobil: 06-30-640-1162;

e-mail: dealtech@interware.hu

 0434